


# アルペンカーバイドバー

メタル除去なら、ワンピース。

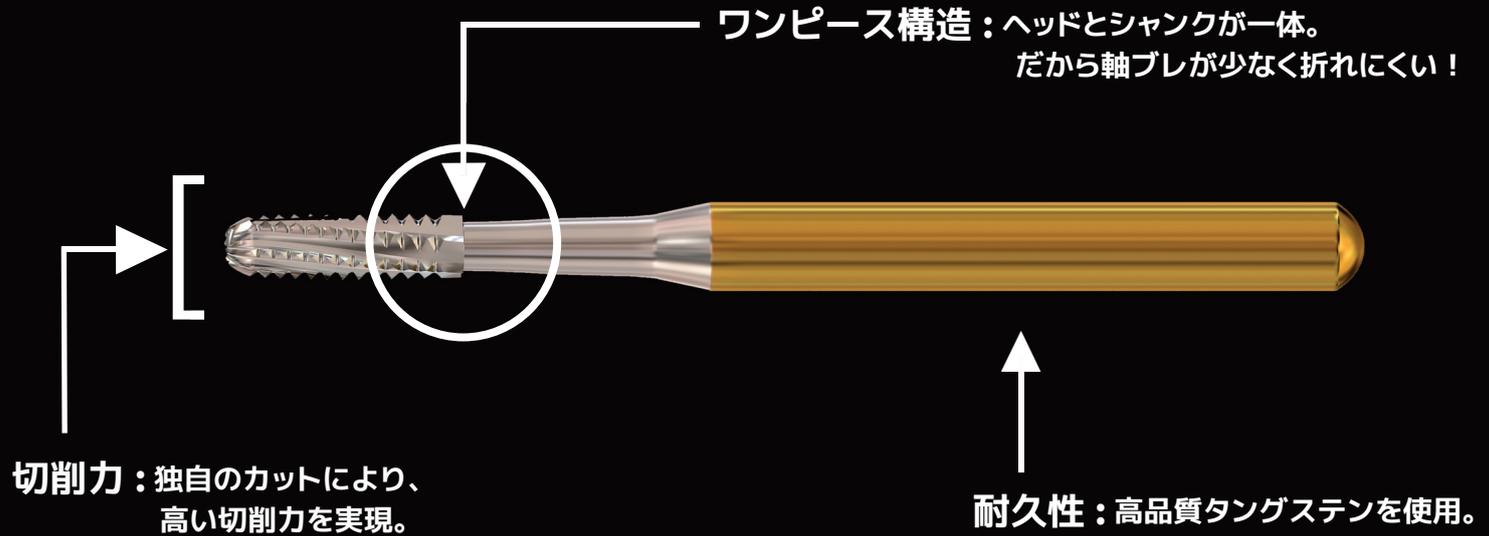

**POINT 1**

アルペンカーバイドバーは  
**折れにくい！**

**POINT 2**

アルペンカーバイドバーは  
**よく切れる！**

**POINT 3**

アルペンカーバイドバーは  
**へたりにくい！**



切削力  
>



アルペンカーバイドバーを  
最大限活かすために...！

- ➡ **5倍速**でのご使用をお勧めします。
  - ➡ エアータービンご使用の際は、推奨回転数をお守りください。
- アルペンは納得の切れ味と耐久性をご提供します！



**メタル除去用**

Pear



Model No. 331G  
直径 (mm) 1.00

Round End  
Cross Cut Fissure



Model No. 1558G  
直径 (mm) 1.20

# アルペンカーバイドバー

# ワンピース構造




**天然歯切削用**

Round



Model No.	1/4	1/2	1	2	3	4	5	6	7	8
直径 (mm)	0.50	0.70	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.10	2.30

Inverted Cone

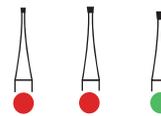


Model No.	33 1/2	34	35	36	37
直径 (mm)	0.70	0.80	1.00	1.20	1.40

Fissure




Model No.	56	57	58
直径 (mm)	0.90	1.00	1.20

Tapered Fissure

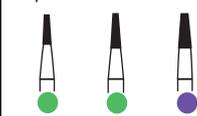

Model No.	169	170	171
直径 (mm)	0.90	1.00	1.20

Amalgam Prep

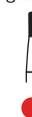

Model No. 256  
直径 (mm) 0.80

Pear




Model No.	330	331	332
直径 (mm)	0.80	1.00	1.20

Cross Cut Fissure



Model No.	556	557	558	559	560
直径 (mm)	0.90	1.00	1.20	1.40	1.60

Round End Cross  
Cut Fissure

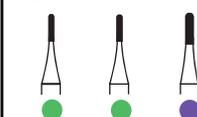

Model No.	1556	1557	1558
直径 (mm)	0.90	1.00	1.20

Cross Cut Tapered Fissure



Model No.	699	700	701	702	703
直径 (mm)	0.90	1.00	1.20	1.60	2.10

Round End Fissure



Model No.	1156	1157	1158
直径 (mm)	0.90	1.00	1.20

Round End  
Tapered Fissure



Model No.	1170	1171
直径 (mm)	1.00	1.20

Long Tapered Fissure



Model No.	169L	170L	171L
直径 (mm)	0.90	1.00	1.20

Long Cross Cut  
Tapered Fissure



Model No.	701L
直径 (mm)	1.20

凡例	推奨回転数 (rpm)	最大回転数 (rpm)	凡例	推奨回転数 (rpm)	最大回転数 (rpm)
●	3,000 - 105,000	300,000	●	24,000 - 48,000	300,000
●	40,000 - 80,000	300,000	●	19,000 - 37,000	300,000
●	30,000 - 60,000	300,000	●	15,000 - 30,000	300,000

※ 耐久性を最大限活かすため、回転数に注意してください。最大回転数を超えると折れやすくなる可能性があります。

※ 商品表示名とカタログ表示名が異なります。

一般的な名称：歯科用カーバイドバー 一般医療機器届出番号：13B1X10231000132

※ 製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

■ 製造販売元

2022.10.07.300

■ 製造業

AJMD株式会社  
http://www.ajmd-medical.com

〒103-0004 東京都中央区東日本橋二丁目4番5号  
TEL: (03)-5614-0733 FAX: (03)-5614-0734



Meinan  
名南歯科貿易株式会社

名南歯科貿易株式会社  
www.meinandental.com

● 名古屋本社

〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号  
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610

● 東京オフィス・ショールーム

〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2埋工図書ビル2F  
TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524



YouTube