

ENDO DONTICS

エンド治療用インスツルメント

ガッタパーチャ除去用インスツルメント

ガッタパーチャを除去するために特別に設計された、寺内吉継先生デザインのドイツ製リムーバーです。

ガッタパーチャリムーバー



ダイヤモンドコーティングされたELESで挿入口を作り、EGPRでガッタパーチャを効率的にかき出します。歯根に挿入しても視界を保てるように、限界まで細く設計された0.3ミリの「返し」が特徴です。

ELES

ガッタパーチャへ挿入口を作るための専用インスツルメント



EGPR L/R(左/右)、EGPR U/D(上/下)

ガッタパーチャをかき出すための専用インスツルメント



●ガッタパーチャリムーバーL/R

針先方向(挿入方向)に対して、返しが左右にあります。

●ガッタパーチャリムーバーU/D

針先方向(挿入方向)に対して、返しが上下にあります。



寺内 吉継 先生

医療法人社団インテリデント理事長
・東京医科歯科大学大学院 非常勤講師
・ボストン大学歯学部歯内療法科 非常勤臨床准教授
・パチエンシア大学歯学部歯内療法科 非常勤教授
・トロント大学スタディープログラム講師
・AAE (米国歯内療法学会) 認定講師
・日本顕微鏡歯科学会認定指導医

寺内先生は、東京医科歯科大学大学院の非常勤講師です。
1993年にDDSを取得、1995年に東京医科歯科大学で研修医を修了・歯内療法学部から博士号を取得しました。
特に破折ファイル除去における世界的権威の一人として、器具開発にも携わっています。国内外の学術雑誌にも記事を発表しており、「Cohen's Pathways of the Pulp」の第11版、第12版を含む、多くの章において執筆をされています。

価格表

全長：155mm 重量：約11.8g 材質：ステンレス/PEEK材
** 全てオートクレーブに対応しております。

商品番号	商品名	販売価格(税別)
015021	コーラー ガッタパーチャリムーバー EGPR-L/R 26 PEEK	各39,800円
015022	コーラー ガッタパーチャリムーバー EGPR-U/D 26 PEEK	
015023	コーラー ガッタパーチャリムーバー ELES 18/26 PEEK	
015010	コーラー ガッタパーチャリムーバー 3本セット	114,800円

販売名：ガッタパーチャリムーバー
一般的名称：歯科用クレンザー
一般医療機器届出番号：23B2X10023000333



Meinan
名南歯科貿易株式会社

エンドファイルホルダー



指や甲が邪魔にならず視界が確保できるため、口腔内が見やすくなります。

必要以上に口を大きく開ける必要がないため、患者様の負担を軽減できます。

「近心根、遠心根」に対応できる2通りの挟み方で、今まで届きにくかった近心時・遠心時・前歯裏や臼歯にもアクセスしやすくなります。

** オートクレーブに対応しております。

遠近心時にファイルを保持した状態



近心時

遠心時

しっかりとロックするので、口腔内での取り落としリスクを減らせます。
** 一部対応していないファイルがございます。

全長：145mm 重量：約30.7g 材質：ステンレス

商品番号	商品名	販売価格(税別)
015016	コーラー エンドファイルホルダー	12,800円

販売名：エンドファイルホルダー 一般的名称：ピンセット 一般医療機器届出番号：23B2X10023000301

MTA用インスツルメント

MTA のデリバリーのしやすさにこだわった専用インスツルメント

MTA コンポジット インスツルメント CLEE



MTA ブロックとセットで使いやすい、MTA セメント専用のデリバリーインスツルメントです。
ブラックコーティングで照明の光反射が軽減されるため、治療に専念できます。

垂直方向と水平方向に平らな面が双頭になっており、それぞれをデリバリー用(D)と余剰カット用(C)に使用します。

** オートクレーブに対応しております。
ケミクレーブはお避けください。

治療時の照明による反射の違い



全長：158mm 重量：約11.9g 材質：ステンレス/PEEK材

商品番号	商品名	販売価格(税別)
015015	コーラー MTAコンポジットインスツルメント CLEE	14,800円
015017	コーラー MTAブロック&CLEEセット	31,800円

販売名：コンポジットインスツルメント 一般的名称：歯科用充填器 一般医療機器届出番号：23B2X10023000334

MTA用インスツルメント

必要な量だけMTA ペーストを簡単計量

MTA ブロック



必要な量だけMTA ペーストを簡単計量できる、MTA用インスツルメントです。

0.6mm、0.7mm、0.8mm、1.0mm、1.2mm の溝盛りとレーザー刻印の表記でセメントで隠れてしまうことがなく、使いやすい形状です。

** オートクレーブに対応しております。
材質は PPSU (ポリフェニルスルホン) です。

全長：77mm 重量：約6.1g 材質：PPSU材

商品番号	商品名	販売価格(税別)
015014	コーラー MTAブロック	18,800円

※ 製品の外観は現物と多少異なる場合がございます。価格・仕様は予告無く変更する場合がございます。

製造販売元 **名南歯科貿易株式会社**



本 社： 〒454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町 2 番 26 号
TEL：(052)799-4075 FAX：(052)353-6610
東京オフィス：〒102-0082 東京都千代田区一番町 27-2 理工図書ビル 2F
& ショールーム TEL：(03)6261-3523 FAX：(03)6261-3524

Web サイト



YouTube



お取扱店