




初めてCADソフト導入や乗り換えまで、幅広く応える操作性

シェーラ イージーモデルは誰にでも扱えて、高精度な歯科模型を製作できるCADソフトウェアです。

CADソフトウェアの機能をモデルビルダーに限定することで、導入しやすい価格を実現しました。製作できる模型は、歯科模型・支台歯模型・インプラント模型・平行模型（**ロイヤル版のみ）で、幅広い製作業務に対応しています。

本商品と合わせて、関連商品もご参照ください。

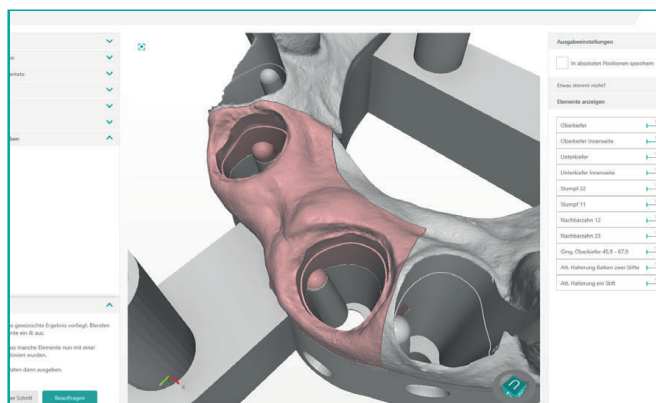


▼ YouTubeでイージーモデルを使って模型製作をする、一気通貫動画も公開中です ▼




スキャンデータから簡単に設計、そのままプリント工程へ



口腔内スキャナーで
デジタル印象採得

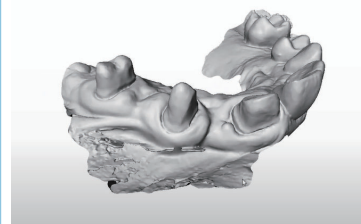

SHERAeasy-model

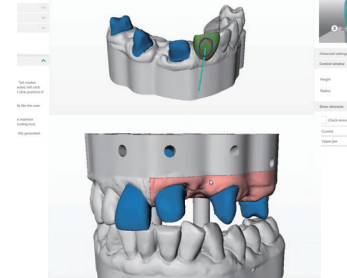

3Dプリンター
アシガMAX UV



関連商品

3Dプリンター
アシガMAX UV



XY解像度
62μm

積層ピッチ
最小10μm

コンパクト
サイズ

コンパクトなのに広い積層サイズ。
静音性に優れた、ASIGAロングセラーの
高精度出力3Dプリンターです。

詳細は弊社Webサイトにてご確認ください。

販売価格 1,800,000円(税別)

別添、トレーニング費 購入取付費などが発生します。
一般的名称：歯科技工室設備用コンピュータ支援設計・製造ユニット
一般医療機器届出番号：23B2X10023000298

窒素充填型光重合器
オトフラッシュ G171N2



口腔内で使用する積層物は生体親和性を
最も要求されます。本機では、その生体
親和性を確保できる便利な重合機です。

窒素充填下で酸素を排出してから光重合
することで、未重合層を最小限にします。

対応波長：280-700nm、電源：AC100V 50/60Hz
**別途窒素ガスをご用意頂く必要があります。

販売価格 498,000円(税別)

一般的名称：歯科技工用重合装置 一般医療機器届出番号：23B2X10023000346

3Dプリンター積層物洗浄機
ツイントルネード



独自のスクリー方式を採用しており、洗浄液を
造形物の隙間まで逃さず行き渡らせます。
もちろん、溝に入り込んでしまった残留樹脂も
しっかりと取り除けます。

さらに一次洗浄・二次洗浄に分けて実施する
ことで、より高品質なポストキュアが可能です。

電源：AC100～240V 50/60Hz

販売価格 97,800円(税別)

3Dプリンター洗浄液
3Dメディカルクリーン



有機剤**非該当の3Dプリンタ用洗浄液。
購入から廃液回収までフンストップで提供
するため、歯科医院様やラボ様の負担を
減らします。

**有機溶剤中毒予防規則

17.7Lサイズ/件

販売価格 19,800円(税別)

4Lサイズ/件

販売価格 9,800円(税別)

※商品の外観は現物と異なる場合があります。価格・仕様は予告無く変更することがあります。

製造販売元



名南歯科貿易株式会社

本社：〒454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町2番26号

TEL：(052)799-4075 FAX：(052)353-6610

東京オフィス：〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2 理工図書ビル2F

& ショールーム TEL：(03)6261-3523 FAX：(03)6261-3524




YouTube

お取扱店

模型製作用CADソフトウェア

SHERAeasy-model

CAD Software for the model design

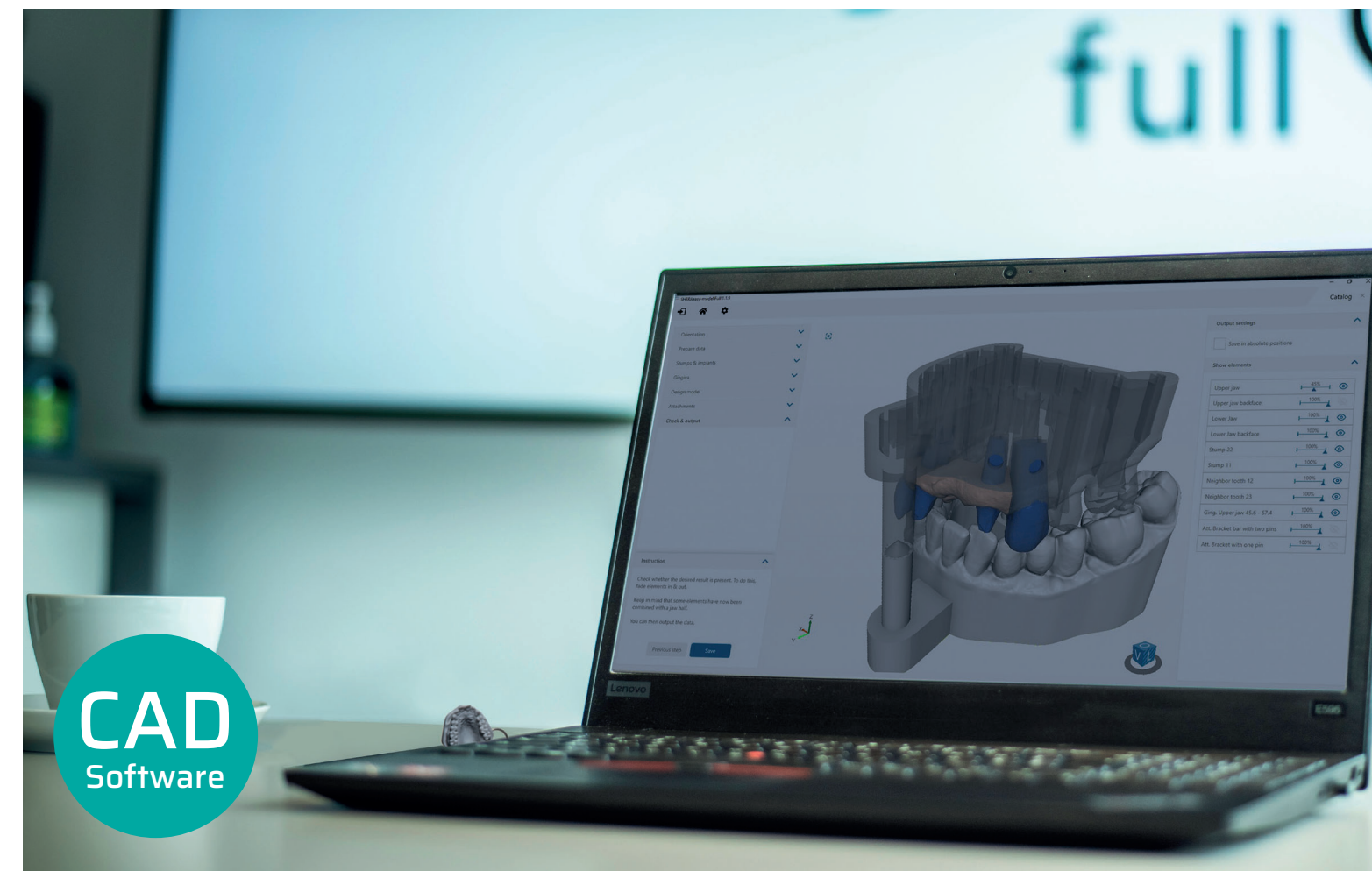


CAD
Software

歯科技工士の名刺でもある歯科模型を デジタル製作するための単体モデルビルダー

SHERAeasy-model


Easy. Sure.
The new model builder.

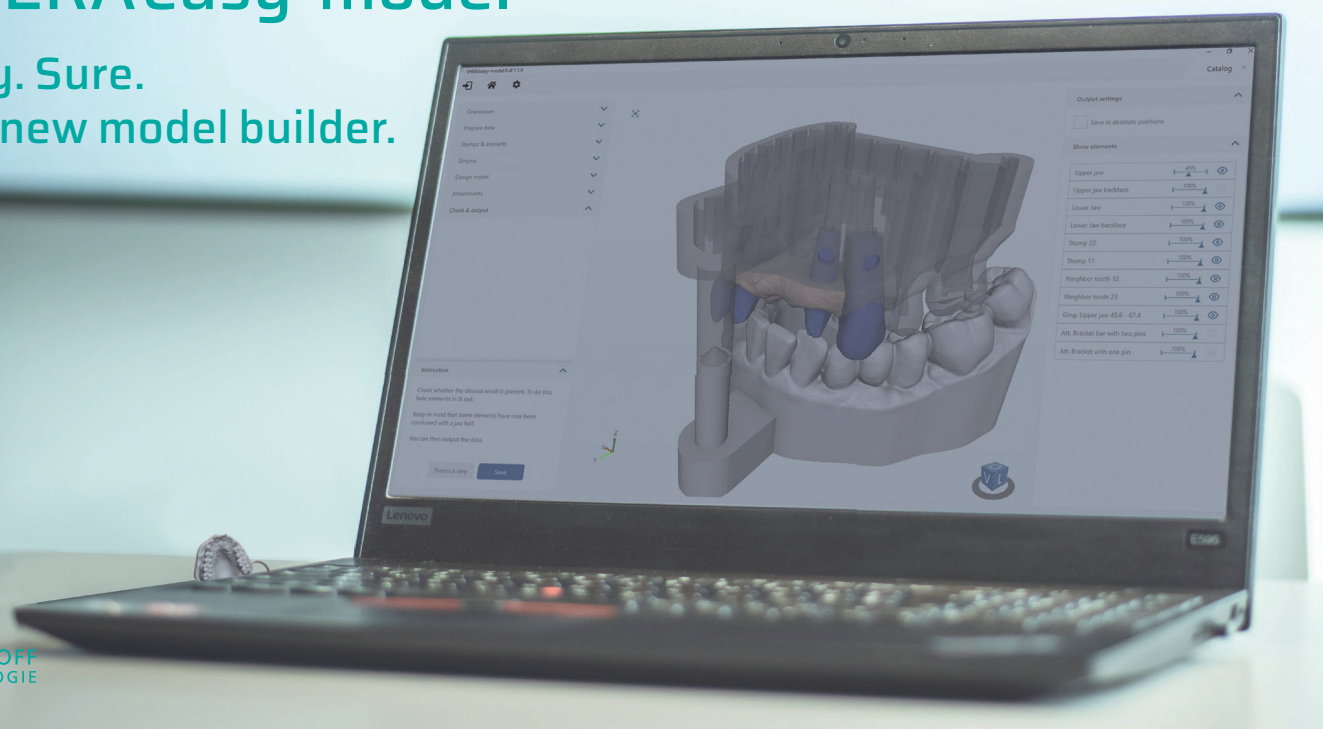


SHERAeasy-model Royal シェーライージーモデル ロイヤル

ロイヤル版には、基本機能に加えて以下のアドオンが付属しております。

ADD-ON
追加機能

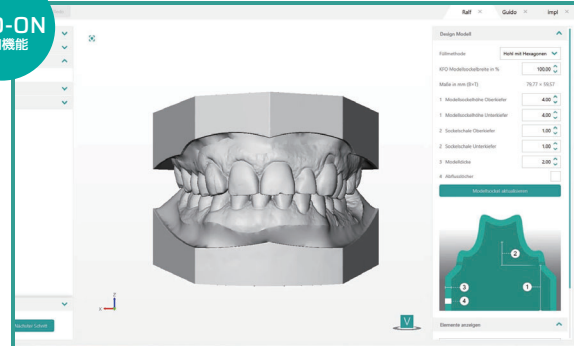

ADD-ON
追加機能

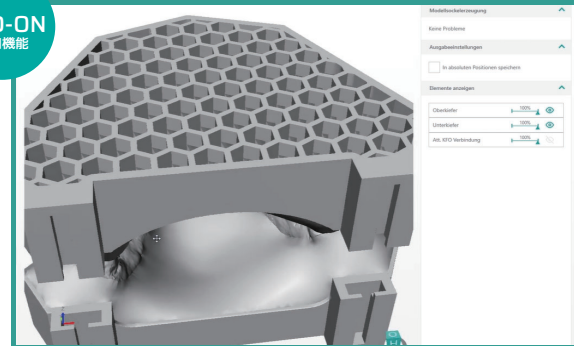

平行模型デザイン


矯正で必須の平行模型が製作できます。
台座のサイズや厚み、アタッチメントの装着も簡単に調節可能です。

大量の製作依頼が集中しても簡単操作で素早く対応でき、作業効率の大幅な向上に貢献できます。


3Dプリンターで造形する際に、樹脂の使用量を用途に応じて調節することも可能です。
以下の3タイプから選択できます。



中埋め
(約 155g)

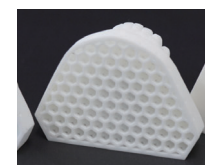

蜂の巣状
(ヘキサゴン)
(約 95g)

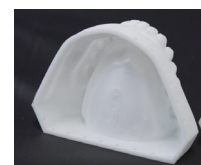

くり抜き
(約 50g)


** 元データの形状やサイズによって、各重量は多少異なります。

ワンクリックデザイン

支台歯の無い歯科模型はワンクリックで製作できます。
STLデータのエクスポート前に細かな微修正も入れられるため、高品質な模型を短時間で製作できます。

** データ荒れが無い、綺麗なSTLデータのみに対応しています。
データ荒れがある場合、正常な模型出力が出来ない場合があります。

ADD-ON
追加機能

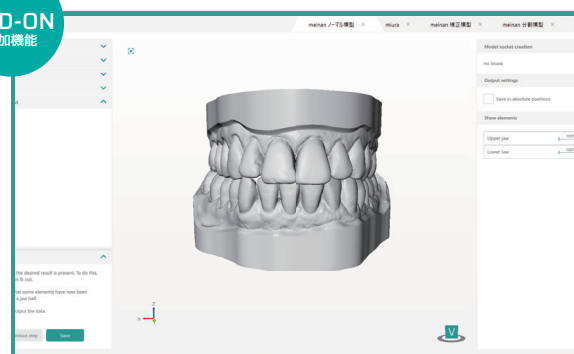

製作機能

SHERAeasy-model

SHERAeasy-model Royal

歯科模型

●

●

支台歯模型

●

●

インプラント模型

●

●

平行模型

-

●

ワンクリックデザイン

-

●

販売価格

260,000円(税別)

290,000円(税別)


【PCの推奨スペック】
システム：Windows 11 64bit
グラフィック：DirectX 11 対応
RAM：8 GB以上

【入力方式】STL、OBJ、PLY
【出力方式】STL

インストール費、トレーニング費用が別途発生します。
また、ライセンス更新料が発生します。詳細はお問い合わせください。

New!!

SHERAprint-plate シェーラプリントプレート 10セット

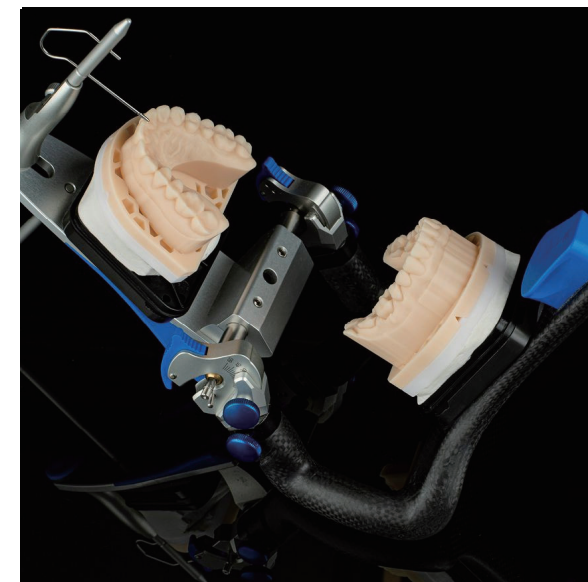


アーティキュレーター（咬合器）へ、
CAD設計した3Dプリント模型をマウント

- マグネット式で模型をいつでも簡単に脱着

- IOSから採得した咬合情報で正確な
マウンティングポジションを再現

- 様々な咬合器に対応

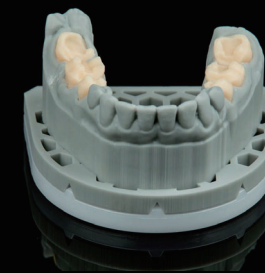

商品内容（各10個入）

・マウンティングプレート(白)

・ネオジウムマグネット

・マグネットキャップ


・吸着ディスク・ねじ

販売価格

13,800円(税別)

簡単操作でパーツの追加が可能

CADソフトウェアのアタッチメント追加画面で、「SHERAprint-plate」を選択するだけ。
後は画面上でプレートの位置を微調整して設定が完了します。
マウンティングプレートにある溝に合わせたSTLデータが出力され、3Dプリンターで積層を行います。
ポストキュア後、咬合器の台座へ石膏で付着したら完成です。

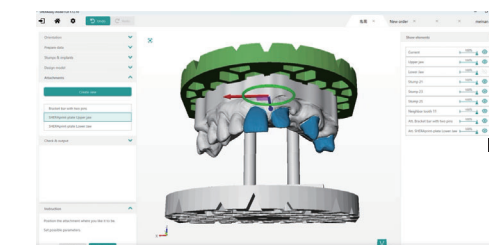

SHERAeasy-model シェーライージーモデル

基本機能

イーージーモデルでは、以下の基本機能で模型製作が可能です。

簡単な操作で模型製作

全顎模型から片顎模型まで、自由に製作が可能です。
それぞれで支台歯模型やインプラント模型など、あらゆる用途に対応できます。

取り込み時のスキャンデータの表面が荒れている場合、
ソフト内の各種ツール機能で調節・カットが行えます。

インプラント模型製作




インプラントのアバットメント装着を想定した模型製作
ができます。
これにより、プリント後に安心してラボアナログを挿入
でき、スムーズに上部構造の製作が可能です。

** 対応していないメーカーもあります。順次追加予定です。

歯肉マスクも自由に設計

歯肉マスク（ガム）が必要な模型も簡単に製作可能です。
支台歯の判定もワンクリックでできるため、支台歯のある
ガム模型を最小限の手順でデザインできます。

** 歯肉マスク（ガム）の3Dプリントには、専用の樹脂を使用してください。
** ASIGA以外の3Dプリンターを使用する場合、ご自身のパラメーター設定が必要です。

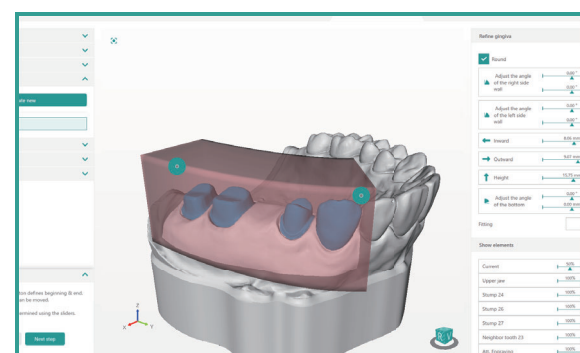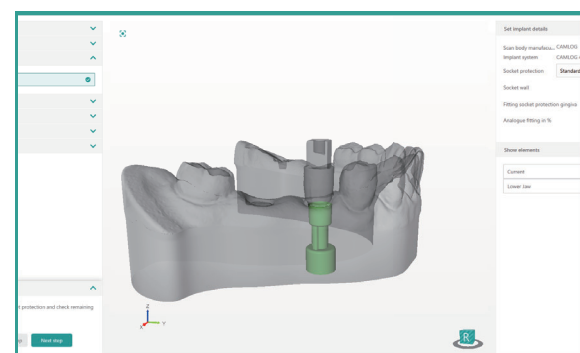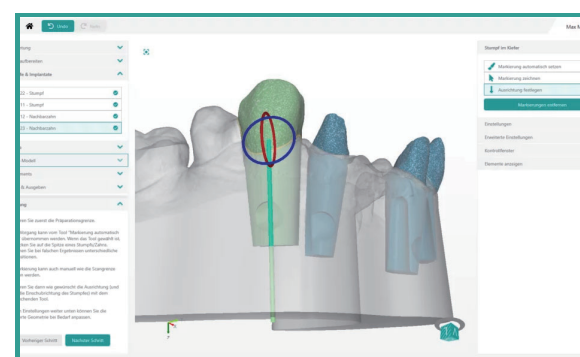

SHERA Digital