

リン酸塩系
埋没材

10kg
箱

3Dプリンター
専用

SHERAVEST RP

3Dプリンター樹脂専用リン酸塩系埋没材

シェーラ ベストRP

10kg (2.5kg/4入)

販売価格

¥11,800 (税別)

従来の3Dプリンター埋没材

シェーラ ベストRP埋没材

3D プリンター樹脂でもクラックやバリ・面荒れが発生しないように
粒度や強度を最適化されている、急速加熱及びオーバーナイト対応の
リン酸塩系埋没材です。

様々な種類の合金に使用が出来ます。(チタンは除く)

発生する酸化物を抑え、精度の高い鑄造結果が得られます。

攪拌から30 分後にファーンネスへ入れられ、時間短縮が可能です。



スペック

一般的名称: 歯科高温鑄造用埋没材 一般医療機器医療機器届出番号: 23B2X10023000261

内容量	10kg (2.5kg/4入)
用途	3Dプリンター樹脂専用
混合比	100g (粉末) : 20ml (専用液+蒸留水)
作業時間/温度	4~6分/20~23℃
鑄造時間	45分以上係留
硬化膨張率	メーカー非公開
急速加熱	対応 (850℃/45分以上) ** 対応金属によります。

■ 関連商品



シェーラ社埋没材専用の混合液

シェーラリキッド

1L ¥4,200-

5L ¥14,800-

正確な膨張を促す、
シェーラ社埋没材専用の混合液です。

表面張力を下げて
埋没材の流動性を上げる
界面活性剤

シェーラ リラкса

スプレー50ml ¥1,400-
詰替用 500ml ¥7,000-

サンプル品
ご依頼OK!

ホルムアルデヒド・アルコールフリーで、鑄造面荒れの
心配が不要な強力界面活性剤です。



クラウン・ブリッジ用

シェーラ マップルリング

3x S Φ47cm ¥7,000-

6x M Φ58cm ¥7,500-

9x L Φ75cm ¥8,000-

シェーラ マップルリング MG

¥8,000-

金属床用向け
(デンチャー用)



全方位の膨張を促す、
軟性のマップルリングです。

シェーラ リングライナー

幅 50x 厚 1mm
合計 25 メートル

¥4,500-

ガス放出性が高い、バイオキャストイング
ライナーです。



※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

2022.09.21 n/a

www.meinandental.com

製造販売元

名南歯科貿易株式会社
Meinan
名南歯科貿易株式会社
www.meinandental.com

●名古屋本社

〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号

TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610

●東京オフィス・ショールーム

〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工図書ビル2F

TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524



YouTube

取扱店