

技工用縮合型シリコン

Benesil

High cost performance Lab Silicone

ベネシル



高いコストパフォーマンスと
スムーズな操作性.

spearmint





POINT1

ベネシルは・・・ 細部の再現性がよい！

ベネシルは、表面が非常になめらかで、ざらつきがほとんどありません。50ミクロンの高い精度により、歯頸部や咬合面まで高い再現性を提供します。

細部再現性
50ミクロン

寸法変化
-0.1 %

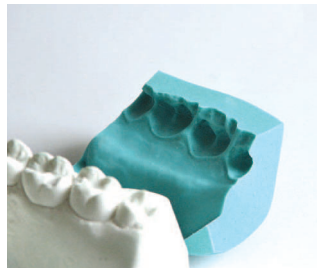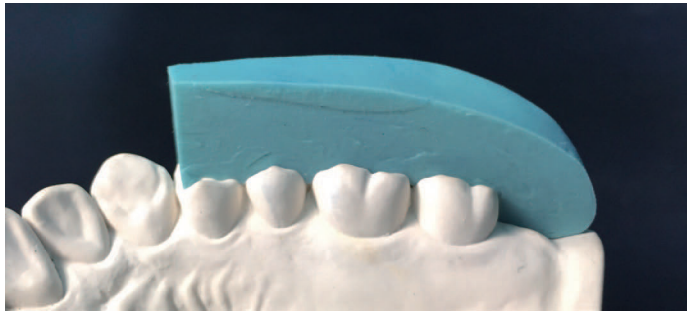

POINT2

ベネシルは・・・ 操作が簡単！

ベネシルは大変練りやすく、また練後の作業時間も扱いやすい4分に設定されていますので、余裕を持って模型にセットできます。セット後は急速に硬化します。

ショア硬度
75



スプーン1杯のシリコンに、約5cmのベネシルキャタリスト（硬化剤）が目安です。



POINT3


ベネシルは・・・ スペアミントの香り。



ベネシルは、頭をスッキリさせ、集中力を高める効果のあるスペアミントの香りです。練和中も作業室に爽やかな香りが広がります。

テクニカルデータ

ベネシルキャタリスト 使用量の目安

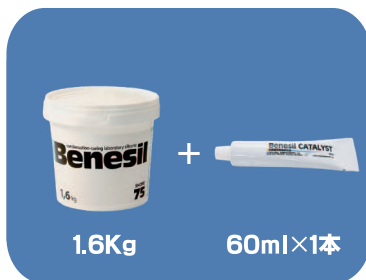

1.6Kg

60ml×1本



5.0Kg

60ml×2本

一般医療機器医療機器届出番号：23B2X10023000272

カラー	グリーン
練和時間	30秒
作業可能時間(23℃)	4分
ショアA硬度(24時間後)	75
細部再現性	50ミクロン
圧縮強度	0.7%
耐熱温度	120℃

価格



ベネシル
1.6kg
¥2,700 (税抜)



ベネシル
5.0kg
¥7,600 (税抜)



ベネシルキャタリスト
(硬化剤)
60ml ¥1,300 (税抜)

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

<http://www.meinandental.com>

■ 製造販売元



名南歯科貿易株式会社
www.meinandental.com

本社 〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号
TEL: (052) 799-4075 FAX: (052) 353-6610
東京オフィス 〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工図書ビル2F
& ショールーム TEL: (03) 6261-3523 FAX: (03) 6261-3524