

バキュームアダプター トラブルシューティング

ケース1. 電源入らない。

電源コードの差込が緩んでないか、断線してないか確認

本体のヒューズ断線の場合交換する

【交換方法】

- ① 本体電源コード差込口上部にあるヒューズボックスを引き出します。



※マイナスドライバー等でヒューズボックスを手前に引き出して下さい。

- ②ヒューズボックス内の予備ヒューズと交換する。



商品コード 005966 商品名 キースン V.A 用 ヒューズ(15A)
--

本体が異常に熱い場合

【復帰方法】

コンセントを抜いて冷まして下さい。(環境による為、数時間以上必要)

※バキュームを1分以上使用すると、内部のモーターが発熱し 100℃以上になると
本体保護機能が働き作動を停止します。

ケース2. 吸引が弱い。

取扱い方法の確認

※弊社ユーチューブ動画有 リンク:https://youtu.be/KanmcRzqA_I


【確認項目】

- ① 石膏模型は普通石膏、硬石膏で作製してください。
- ② 石膏模型は良く乾燥して下さい。
- ③ 石膏模型の基底面は平らにして下さい。
- ④ 石膏模型は口蓋部が抜けるくらい低くして下さい。

成型が不十分な場合

【対策方法】

- ① 加熱時、ジスクホルダーの枠下 1.5～2cm ほど垂れ下がったのを確認しバキュームを開始して下さい。

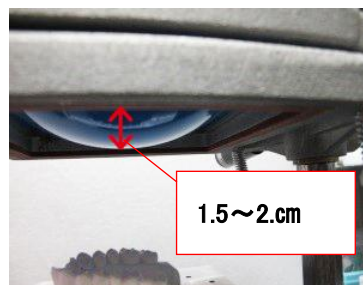

※垂れ下がり過ぎると薄くなったり、シワ寄せ、成型不良につながります。

② バキューム完了後、4分以上経過後ジスクホルダーから取り出す。

※未だ温かいうちに撤去しますと変形しますので、完全に冷える迄お待ちください。

③ 他社製ジスクの場合、加熱時間、吸引時間等を調整してみてください。

《加熱時間と吸引時間の目安》

厚み	加熱時間	吸引時間
0.5mm	1 分 30 秒	10～15 秒
1.0mm	1 分 30 秒	15～20 秒
2.0mm	2 分	15～20 秒
3.8mm	2 分 30 秒	20～30 秒

※気温やヒーターの温度状況、環境によって加熱時間/吸引時間は異なってまいります。


※ジスクの軟化状態は目視で確認していただくことをお勧めいたします。

※キーストン社製ジスクの厚みの場合の時間の目安となります。他社製のジスクをご利用の場合、加熱・吸引時間が変わる可能性があります。

④ 加熱時にマウスガードが外れてくる場合、ジスクホルダーの左右にあるナットの締め付けで調整する。



⑤ ガasketが剥がれてたり、損傷したら交換して下さい。

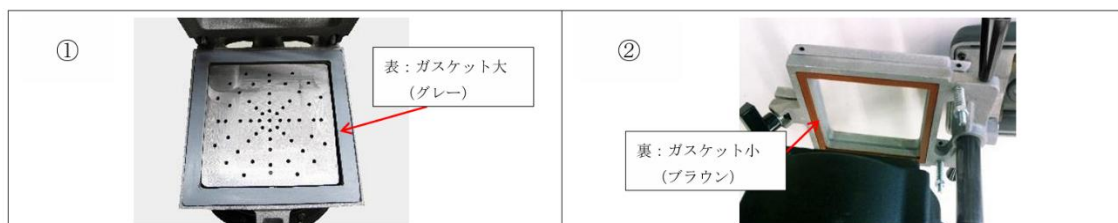


商品コード 005961 キーストン ガスケット 大、小 (各1枚入)

ケース3. ジスクホルダーが固定できない。

ロッキングピンの確認

① ロッキングピンが挿入されているか確認する。

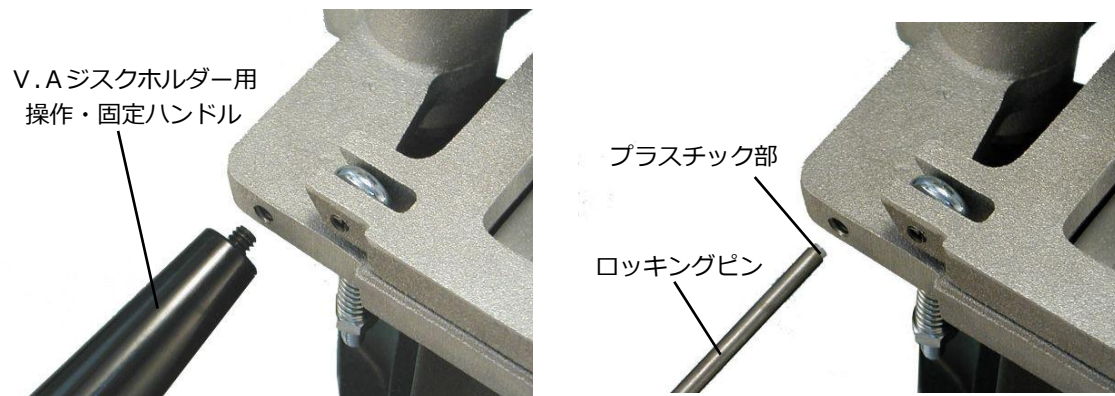

※ジスクホルダーの正面向かって左側奥のハンドル差込口内にあります。

② 挿入されてるのに固定出来ない場合は、ロッキングピンの先端(プラスチック部)を確認し摩耗してたら交換して下さい。

※尚、取り出し出来ない場合は、修理依頼して下さい。

ケース4. ジスクホルダーのバネ、ナットは購入可能か？

単品購入可能です。(各 1 個単位)



商品コード 005989 商品名 V.A 用スプリング
商品コード 005990 商品名 V.A 用アイボルト固定ナット